

ハンドピース専門メーカーナカニシのハンドピースのための滅菌器

滅菌応援 キャンペーン

2025

1/21火

3/20木



製品の詳しい
情報はこちら



ナカニシ社製滅菌器 iClave mini2 特別価格でご提供致します

※お取引ディーラー様へお問い合わせください



特長

1

ハンドピースにやさしく 内部までしっかり滅菌

高圧蒸気重力置換による高い滅菌力

滅菌前の重力置換工程を従来より増やし、さらにハンドピースの滅菌に適した縦型配置により、蒸気浸透度を高めることで、滅菌力が向上しました。

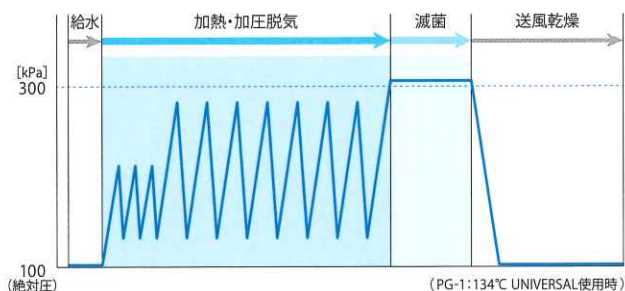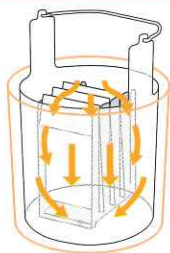

特長

2

優れた操作性で お手入れも簡単

見えやすく、簡単操作のLCDパネル

LCDパネルを採用したことで、視認性が大幅にアップ。用途にあったプログラの中から選択し、ボタンを押すだけの簡単操作。また、プログレスバーにより、現在の進行状況や残り時間が一目でわかります。

使いやすさと清掃性が向上したスマートデザイン

LCDパネル採用したシームレスな外装は、清掃がしやすく、簡単にお手入れが可能です。



ヨーロッパ滅菌基準

EN13060 : Class S 準拠



	プログラム	温度	滅菌時間	包装形態
PG-1	134°C UNIVERSAL	134°C	5.5分	一重包装
PG-2	134°C FAST	134°C	3.5分	未包装
PG-3	121°C UNIVERSAL	121°C	35.5分	一重包装
PG-4	121°C FAST	121°C	30.5分	未包装

- UNIVERSAL : 一重包装 FAST : 未包装 (滅菌後即時使用)
- 滅菌 (STERILIZING) 工程の前に、加熱 (HEATING) 工程が約8~25分かかります。
- 使用する水は、15 μS/cm以下の蒸留水、精製水、純水、または、イオン交換水、RO水のいずれかをご使用ください。
- 送風乾燥時間は (2~90分) の変更が可能です。

製品名	製品番号	標準価格
iClave mini2 標準セット	Y1500013	¥459,000

セット内容

iClave mini2 ユニット / バスケット
仕切りスタンド / 仕切り板(長)×4
仕切り板(短) / 排水タンク
各種基本パーツ

仕様

外形寸法(ドア全開時:H) : W210×D370×H360mm (H600mm) / 総重量(ユニット本体) : 17.5kg / 電源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 750VA (定格消費電力750W) / チャンバー寸法 : φ130×L200mm / チャンバー容量 : 2.5L
給水タンク容量 : 1.5L / 排水タンク外形寸法 : W140×D195×H234mm / 排水タンク容量 : 5L / 排水ホース : 1.5m
ハンドピース滅菌本数目安 : 12本 (未包装)、6本 (一重包装)

販売名:アイクレーブミニ2 一般的名称:小型包装品用高圧蒸気滅菌器 認証番号:302AB8ZX00049000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■ナカニシ社製品販売代理店

ANGEL 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目2-1-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第2西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

■製品に関するお問い合わせ・ご注文は下記取扱店まで

仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。